


## PISTERO NOVO CUP

Ref.: NC



1. Llenar el pistero con líquido.

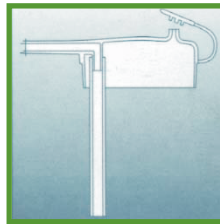

2. Fijar la pajita firmemente en la boquilla en la parte interior de la tapa.



3. Colocar la tapa. Si el usuario está sentado no es necesario cerrar el tapón.



4. Si el usuario está en la cama, cerrar el tapón. El líquido sólo saldrá por succión.

Perfecto para usuarios encamados, incluso con mínima autonomía. Completo control del fluido, sin necesidad de incorporarse o levantar la cabeza. Ideal para personas con movilidad reducida en la cabeza o cuello.

- Impide el derrame de líquidos.
- Apto para líquidos calientes y fríos.
- Transparente, contenido visible.
- Capacidad 250 ml. con graduación cada 25 ml.
- Puede ser utilizado en lavavajillas, microondas y autoclave.



UGARI GERIÁTRICA S.L

C/VENTA DE LA ESTRELLA 6, PAB.126. 01006 VITORIA-GASTEIZ (SPAIN)

Tel.(+34) 945-146744, Fax.(+34) 945-154036 E-mail: ugari@ugari.es