

# ELEVADOR WC AD509A / AD509B /AD509C



ESTE ECONOMICO PERO SEGURO Y EFICAZ ELEVADOR ES DE PLÁSTICO COMPLETAMENTE SELLADO, QUE RESISTE LOS OLORES Y LAS MANCHAS. EL ACABADO SUAVE FACILITA LAS TRANSFERENCIAS LATERALES Y SU RECORTE TRASERO DE GRAN TAMAÑO, PARA EL COXIS, PROPORCIONA UNA POSTURA CÓMODA, Y FÁCIL ACCESO PARA LA HIGIENE PERSONAL. SE ADAPTA A LA MAYORIA DE RETRETES SIN NECESIDAD DE OBRAS O INSTALACIONES Y CON SOLO APRETAR LAS DOS PALOMILLAS LATERALES EL ELEVADOR SE MANTENDRÁ SEGURO Y FIRME SOBRE LA TAZA DEL WC.

## INSTALACION

Lea atentamente antes de utilizar su elevador.

1. Gire los pomos de las patillas laterales en sentido contrario de las agujas de reloj para abrir el elevador hasta que pueda apoyar encima del inodoro.
2. Tire del elevador hacia atrás, de modo que la solapa delantera haga tope con el inodoro.
3. Apriete los pomos laterales hasta asegurar firmemente el elevador en el inodoro. No apriete exageradamente.



Peso máximo usuario: 130kg.

Altura de elevación: <b>AD509A</b>	<b>15cm</b>
<b>AD509B</b>	<b>10cm</b>
<b>AD509C</b>	<b>5cm</b>

## LIMPIEZA

Todas las piezas pueden limpiarse utilizando un trapo y una solución de detergente suave. Se puede lavar hasta 90°. Las patillas laterales se pueden extraer totalmente para facilitar su limpieza y sin necesidad de herramientas.

## GARANTIA

La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.



Importado por:  
**Ayudas Dinámicas**  
c/Llobregat, 12 Polígono Industrial URVASA  
08130 Santa Perpètua (Barcelona) ESPAÑA  
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75  
[info@ayudasdinamicas.com](mailto:info@ayudasdinamicas.com)  
[www.ayudasdinamicas.com](http://www.ayudasdinamicas.com)

