



Ayudas Dinámicas

MANUAL DE USUARIO AD250/251ALU



INTRODUCCIÓN

Productos fabricados y diseñados de acuerdo con las más estrictas normas de calidad y seguridad y se ajustan a las directivas europeas (MDD 93/42/EEC).

Es imprescindible observar las siguientes indicaciones de utilización y mantenimiento:

- Antes de cualquier utilización, compruebe que el producto le haya sido entregado en perfecto estado.
- Póngase en contacto con el vendedor si tiene dudas respecto a las limitaciones de uso, al ajuste o al mantenimiento del producto.
- No exceda el peso máximo de usuario o el peso máximo de carga indicado en las especificaciones del producto.
- Procure siempre que el producto se adapte a sus necesidades. En caso de duda, consulte con un profesional de la salud.
- Haga sustituir inmediatamente las piezas gastadas, dañadas o faltantes.
- No deje o almacene el producto en el exterior.
- Compruebe periódicamente la estabilidad y rigidez del producto, y en su caso, el correcto ajuste de los tornillos y el estado de las conteras de goma.
- Es imprescindible prestar mucha atención cuando se utiliza el producto sobre una superficie húmeda.

APERTURA Y PLEGADO DEL ANDADOR



Cuando utilice el andador este deberá estar siempre completamente abierto y anclado.

- Empuje la barra transversal (A) del sistema de plegado hacia abajo para la apertura.
- Tire de la barra transversal (A) del sistema de plegado hacia arriba para plegar el andador.



MONTAJE DE LAS EMPUÑADURAS

- Retire en su caso los tapones de los extremos de los tubos laterales
- Monte la empuñadura derecha en el orificio derecho y la empuñadura izquierda en el orificio izquierdo, con las partes hacia el interior y la parte ondulada donde se ubicarán los dedos de la mano en el exterior.

REGULACIÓN

- Utilice los pomos (B) para fijar los tubos a la altura correcta. Saque completamente el tornillo, regule los tubos a la altura deseada y vuelva a insertar el tornillo por el orificio fijándolos con los pomos (B).
- Se debe ajustar de manera que la empuñadura esté a la altura (C) de la muñeca del brazo del usuario en reposo.



LIMPIEZA

Para limpiar el caminador AD250 de acero utilice un trapo suave.

i Si la estructura de acero de la silla se moja, séquela inmediatamente para evitar la oxidación.

Para limpiar el caminador AD251ALU, utilice un paño suave humedecido para limpiar el polvo y la suciedad. Utilice agua jabonosa para la suciedad más resistente. Seque con un paño suave.

ESPECIFICACIONES

Modelo	AD250	AD251ALU
Ancho	60cm	58cm
Fondo	63cm	62cm
Alto graduable	83-96cm	80-94cm
Peso	5,6kg	3,7kg
Peso máx.	150kg	100kg

GARANTÍA

La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.



Importado por:
Ayudas Dinámicas
c/Llobregat, 12 Polígono Industrial URVASA
08130 Santa Perpètua (Barcelona) ESPAÑA
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75
info@ayudasdinamicas.com
www.ayudasdinamicas.com



Fabricado por:
CHAINFEATS ENTERPRISE Co. Ltd.
F8 HSIN SHENG. TAIPEI. TAIWAN