

COJINES SANILUXE



Descripción

Cojines antiescaras saniluxe impermeables, rellenos de fibra siliconada conjugada. Dispone de cintas para fijar el cojín a la silla de ruedas u otros asientos.

Efectos y ventajas

Gracias a su composición y forma se libera la zona de presión previniendo la aparición de úlceras por presión (UPP).

Recomendado para aquellas personas que permanecen periodos de tiempo largos sentados por movilidad reducida, vida sedentaria etc.

Asimismo, según la patología (postparto, hemorroides, fístulas, operaciones de próstata, etc.) se recomienda una forma u otra para liberar de presión la zona afectada.

Propiedades del tejido de poliuretano:

Antiácaros, antibacterias, antihongos, antiolor, antimanchas, transpirable, ignífugo, impermeable, suave y lavable.

Peso máximo de soporte: 80kg.

Grado de riesgo: bajo-medio.

Instalación

El cojín se adapta a cualquier tipo de asiento, aún así se debe verificar primero. Se debe tener en cuenta que los cojines con forma de herradura, la parte abierta se posiciona en la zona del respaldo (ver ilustración).

Composición

- Funda exterior:

Tejido formado por dos capas:

Revestimiento 100% poliuretano.

Parte interior: Tejido 100% poliéster.

Grosor del tejido: 230g/m².

- Relleno: Fibra hueca siliconada conjugada. Dispone de cintas 100% poliéster para sujetar el cojín a la silla de ruedas u otros asientos y facilitar su posición.

Dimensiones

- Redondo con agujero: 44x11cm.

- Resto de cojines: 44x44x11cm.

Mantenimiento

Cepillar o sacudir periódicamente la cara de fibra para mantenerla en condiciones óptimas y ralentizar su deterioro.

Lavar a mano con agua fría y productos no abrasivos. En caso de lavar a máquina, utilizar un programa para prendas delicadas y suprimir el centrifugado. Se recomienda utilizar una funda o red especial para evitar la deformación durante el lavado.

Secar en posición horizontal.

No planchar.

No usar lejía.


No limpiar en seco.

Garantía


El periodo de garantía de todos los cojines excepto los de Flotación Líquida y Silicona es de dos años a contar desde la fecha de compra del cojín. Los cojines de Flotación Líquida y Silicona tienen una garantía de 3 meses. Esta garantía no cubre el desgaste normal del producto y no sustituye a las garantías legales. Rogamos contactar con el departamento de calidad de la empresa en caso de incidencia para resolverla.

Antiescaras


Cojines saniluxe Modelos

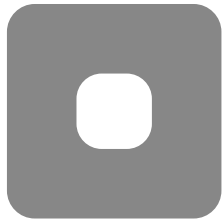

Cuadrado
con agujero

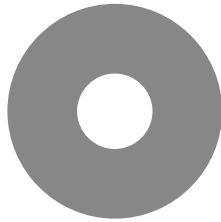


Redondo
con agujero

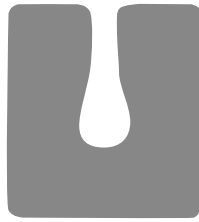

Herradura
cuadrada



Herradura
redonda

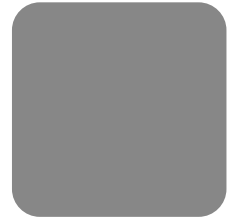

Cuadrado

Colores



Grafito




Celeste



Blanco

Forma correcta de
colocar un cojín de
herradura.

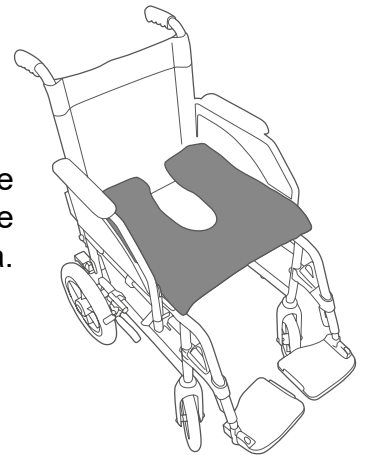

MODELO	DIMENSIONES (CM)	COLOR	VERSIÓN	REF.
Cojines saniluxe	44x11	Grafito	Redondo agujero	114100
	44x44x11	Grafito	Herradura redonda	114105
			Herradura cuadrada	114110
			Cuadrado agujero	114115
			Cuadrado	114120
			Cuadrado	114122
		Celeste	Cuadrado	114124
		Blanco	Cuadrado agujero	114126
			Cuadrado agujero	114128
		Celeste	Herradura cuadrada	114130
			Herradura cuadrada	114132
	Blanco	Herradura redonda	114134	
		Herradura redonda	114136	
	44x11	Celeste	Redondo agujero	114138
		Blanco	Redondo agujero	114140



ANTIÁCAROS



ANTIHONGOS



ANTIBACTERIAS



ANTIOLOR



ANTIMANCHAS



TRANSPIRABLE



IGNIFUGO



IMPERMEABLE



SUAVE



LAVABLE



ANTIDESLIZANTE